




# IDDSI Embudo

## Instrucción para su uso

El embudo de IDDSI está diseñado para medir el flujo de los líquidos.

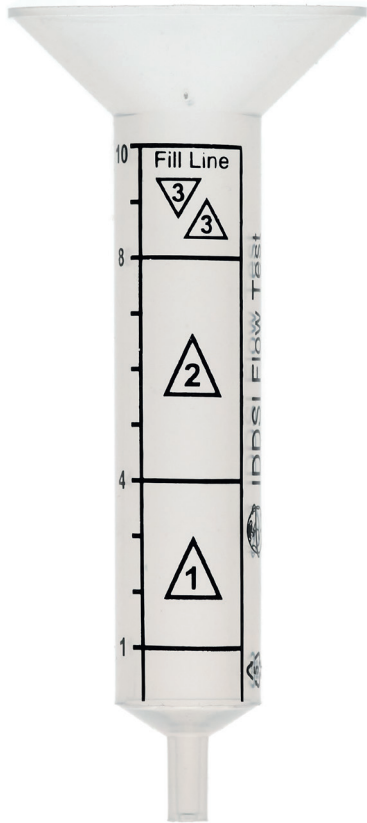


**Nota:** El embudo de IDDSI no es un instrumento médico y no tiene uso oral, enteral, parenteral o intravenoso. Deseche todos los alimentos o líquidos que hayan tenido contacto con un embudo IDDSI.


## 1 Antes de usar el embudo de IDDSI, lave y luego pruebe con agua para verificar su funcionamiento apropiado

Procedimiento para prueba de funcionamiento del embudo previo a su uso:


1. Cubra la punta o boquilla con el dedo

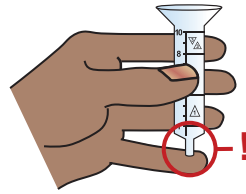



2. Ponga agua hasta la línea superior

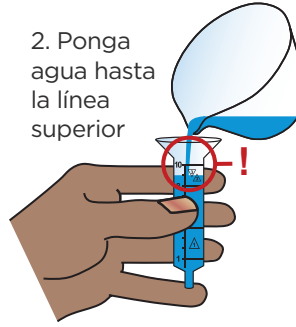

3. Saque el dedo de la punta o boquilla mientras inicia el cronómetro

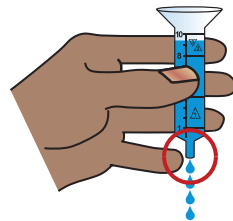

4. Detenga el cronómetro una vez el embudo esté vacío

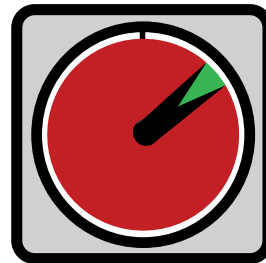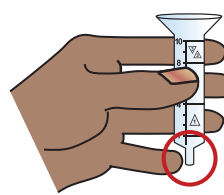


### 6.5 - 7.2 Segundos

El embudo debe quedar vacío entre 6.5-7.2 segundos. Si no es así, repita la prueba. **Si el embudo queda vacío en menos de 6.5 segundos o en más de 7.2 segundos luego de tres pruebas, se recomienda descartar y no usar.**

## 2 Use el embudo de IDDSI para probar el flujo del líquido

El nivel de IDDSI depende de la cantidad de líquido remanente en el embudo luego de 10 segundos:


1. Cubra la punta o boquilla con el dedo

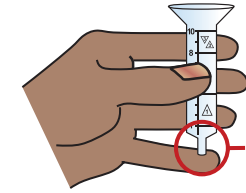



2. Ponga el líquido hasta la línea superior




3. Saque el dedo de la punta o boquilla mientras inicia el cronómetro

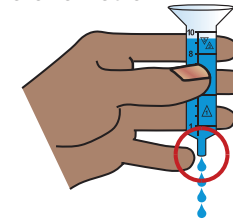

4. Detenga el cronómetro a los 10 segundos

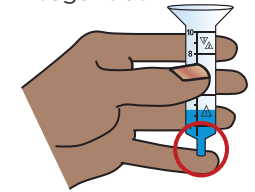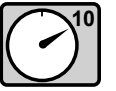

**Nivel 4:** Usar la prueba de flujo y la prueba de inclinación de la cuchara  
**Nivel 3:** Usar la prueba de flujo y la prueba de goteo del tenedor

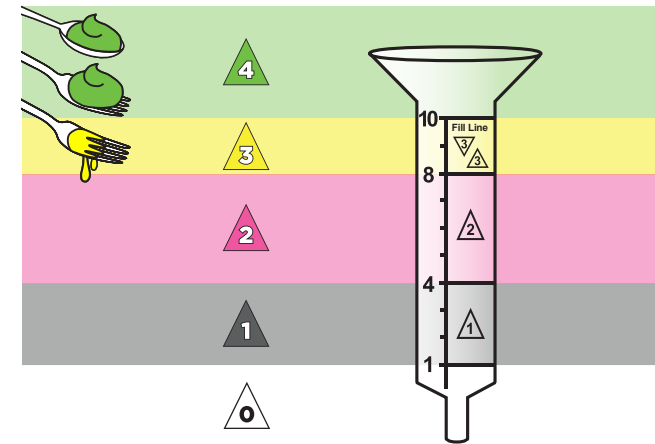


**Recuerde:** Deseche todos los materiales de comida y líquidos que hayan sido probados con el embudo, dado que no deben ser consumidos.


El embudo de IDDSI puede ser lavado y reutilizado. Vea las instrucciones de lavado y cuidado en la siguiente página.

# 3 Cuando descartar un Embudo de IDDSI


Los embudos han sido probados en lavadora de platos comerciales sobre 30 lavados, sin afectar su función o integridad.

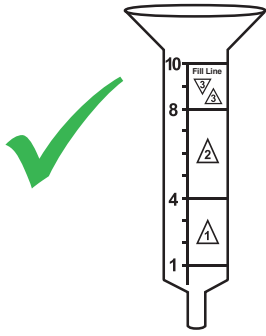

**Los embudos no deben usarse cuando:**  
Las marcas ya no son fácilmente visibles

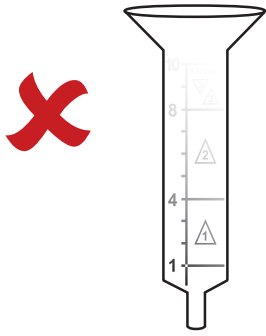

El embudo ha perdido forma, está agrietado, manchado o dañado

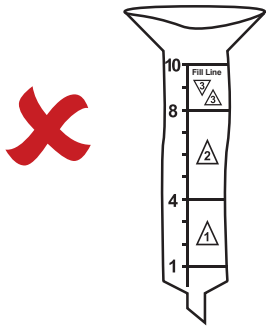


# 4 Instrucciones para el cuidado y la limpieza

Considere seguir las instrucciones de Salud Pública de su lugar para procedimientos de limpieza específicos


## Instrucciones para el lavado a mano

1. Enjuague el embudo
2. Lave con agua jabonosa tibia y enjuague bien
3. Revise si en el embudo quedan residuos y lave nuevamente si es necesario
4. Seque al aire sobre una superficie limpia

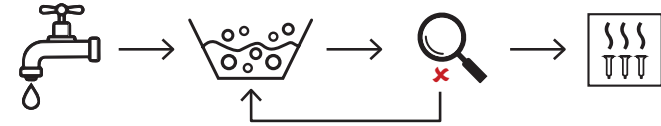


## Instrucciones para lavado en lavadora de platos

1. Enjuague el embudo (particularmente cuando haya sido usado con un líquido espeso o alto en proteínas)
2. Coloque el embudo enjuagado en el lavadora de platos
3. Cuando el ciclo de lavado haya finalizado, revise si el o los embudos tienen residuos, si es así, lave nuevamente
4. Seque al aire sobre una superficie limpia

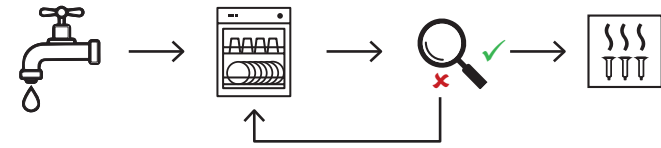

## Instrucciones para lavadoras de platos industriales (Temperatura alta o baja)

1. Pre-enjuague los embudos (particularmente si fueron usados con un líquido espeso o alto en proteínas)
2. Coloque los embudos pre-enjuagados en uno de los estantes abiertos
3. Cubra los embudos con la tapa del estante
4. Lave, enjuague y desinfecte
5. Una vez se termine el ciclo, verifique si los embudos tienen residuos, y vuelva a lavar si es necesario
6. Seque al aire sobre un paño estéril o una superficie limpia

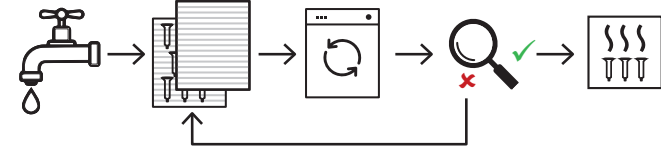

## Para medidas adicionales de control de infecciones:

Antes de usar, siga las pautas e instrucciones específicas para esterilizar el embudo.